


1) Vyberte správný odstín kompozitu před vysušením pracovního pole. Dehydratace může změnit barvu zubu.




9) Vyměte pásek Dentapreg® UFM z blistry a ustrihněte ho pomocí nůžek na požadovanou délku. Nedotýkejte se nechráněné části pásku holou rukou. Vždy používejte latexové nebo vinylové nepudrované rukavice. Nespotebovanou část pásku uchovávejte v ochranném obalu (light protection box), který je součástí balení. Uchovávejte ji na tmavém místě - ideálně v lednici. Můžete ji použít během následujících 4 týdnů.

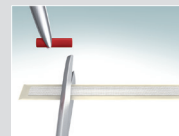

2) Zajistěte suché pracovní pole. Doporučujeme použít kofrdam.



10) Naneste tenkou vrstvu (cca 0,5 mm) kompozitního výplňového materiálu na retenční plochu zubu. NEVYTVRZUJTE!

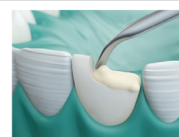


3) Pomocí matrice izolujte mezizubní prostory. Okolní zuby můžete také pokrýt teflonovou páskou. Usnadníte tak finální čištění.




11) Z pásku odstraňte ochrannou folii a papír. Pásek umístěte do požadované pozice v nevytvrzeném kompozitu. Dentapreg® UFM je flexibilní a můžete ho roztáhnout na šířku až 10 mm. Pro jednodušší adaptaci a manipulaci s páskem použijte nástroj Dentapreg® Fork. Pokud nástroj obalíte v adhezivu, bude se vám s ním lépe pracovat.



4) Změřte, jak dlouhý pásek budete potřebovat (např. pomocí voskového pásku či zubní nitě). Mějte při tom na paměti, že délka pásku by měla být zvolena tak, aby pásek nahradil přirozené rozhraní mezi dentinem a sklovinou a kopíroval incizální hranu zlomeného zubu.

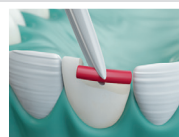


12) Adaptujte pásek tak, že jeden konec leží na dně preparace a druhý z ní vyčnívá podél orální strany zubu a tvoří tak retenční plochu pro obnovení incizální hrany. Pokud je to možné, ohněte vyčnívající konec pásku zpět do kompozitu.

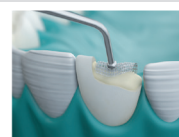


5) Naleptejte retenční plochu zubu leptacím gelem s 37% kyselinou ortofosforečnou. Při nanášení dbejte pokynů výrobce.



13) Pásek vytvrzujte po dobu minimálně 40 s pro každý zub.

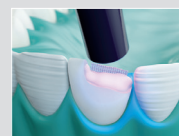


6) Důkladně opláchněte a osušte.

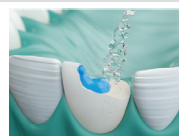


14) Vybudujte korunku vrstvením kompozitního výplňového materiálu v souladu s doporučením výrobce kompozitu. Dbejte, aby všechna vlákna pásku byla zcela zakryta kompozitem. Mezizubní prostory nechte volné pro umožnění hygieny.



7) Na naleptanou retenční plochu zubu naneste tenkou vrstvu adhezivního systému.

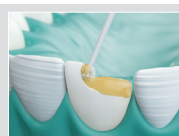

15) Vytvrďte celou korunku v souladu s doporučením výrobce.

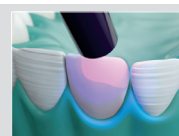

8) Vytvrďte adhezivum podle pokynů výrobce.



16) Dokončete korunku, upravte povrch okluze a vyleštěte ji.



Základní popis:

Zdravotnický prostředek (ZP) Dentapreg® UFM je zpevňující materiál využívaný v oblasti záchovné stomatologie. Jedná se o tvarovatelný pásek tvořený spleťnými skleněnými vlákny s povrchovou úpravou, která jsou impregnována světlem tvrditelnou polyerní maticí.

Určené účely použití:

Zdravotnický prostředek Dentapreg® UFM je určen k vyztužení rozsáhlejších dostaveb zubů (např. inlej, onlej, overlej), korunek a fazet přímou nebo nepřímou metodou.

Kontraindikace:

Ve vzácných případech může použití ZP souviset se vznikem alergické reakce. Použití ZP Dentapreg® je kontraindikováno u pacientů, u nichž je známá citlivost na některou ze složek, kterou ZP Dentapreg® obsahuje (zejména metakrylátové monomery a polymery).


Bezpečnostní opatření:

- Při aplikaci je doporučeno používat latexové či vinylové nepudrované ochranné rukavice a uplatnit bezdotykovou techniku.
- Vyvarujte se přímému pohledu do světla polymerační lampy, při vytvrzování použijte ochranné brýle. Chrňte také oči pacienta.
- Vyvarujte se zasažení očí, spolknutí a kontaktu s kůží a měkkými tkáněmi.
- V případě kontaktu nevytvrzeného pásku s měkkými tkáněmi či kůží, jemně setřete zasažené místo vatovým tamponem či gázou a vypláchněte vodou. V případě výskytu přecitlivlosti (alergické reakce) vyhledejte lékařskou pomoc a produkt u daného pacienta v budoucnosti nepoužívejte.
- Informujte pacienta o nutnosti dodržování hygienických zásad.
- Informujte pacienta, že má v případě funkčního selhání bez odkladu navštívit zubního lékaře.
- V případě výskytu jakékoli závažné nežádoucí příhody ihned kontaktujte výrobce a příslušné regulační orgány.


Výrobce

ADM, a.s., ul. Vodárny 2, 616 00 Brno, Czech Republic
www.dentapreg.com

Poslední úprava: květen 2021

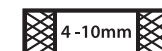

Piktogram uvedený na obalech definuje šířku a strukturu pásku

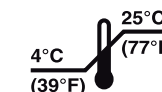

Důležitá upozornění:

- Produkt nepoužívejte v případě, že uplynula doba expirace.
- Produkt není určen k vícenásobnému použití.
- Produkt nepoužívejte v případě, že došlo k jeho kontaminaci či jinému poškození při jeho relokaci na určené místo použití.
- Nepoužívejte v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, fenolické látky mohou ovlivnit vytvrzení pryskyřičné matrice.
- Produkt nepoužívejte v případě, že je ochranný obal jakkoli poškozen.
- Vyhněte se použití přímého intenzivního světla v pracovním poli, mohlo by dojít k předčasnému vytvrzení a ztrátě aplikačních vlastností.
- Před vyhozením do odpadu produkt označte a znehodnotte vytvrzením. Zajistěte svoz zdrav. odpadu certifikovanou firmou.
- Cílová skupina pacientů není omezena a odpovídá prevalenci postižení.

Údaje o kompatibilitě

- Adhezivní systém: pro adhezivní přípravu povrchů tvrdých zubních tkání použijte běžný světlem tvrditelný adhezivní systém. Dbejte pokynů výrobce použitého kompozitního materiálu.
- Kompozitní materiál: pro usazení i překrytí vláknové výztuže použijte běžný světlem tvrditelný kompozitní materiál na bázi metakrylátu (univerzální výplňové kompozity typu *bulk fill*, kompozity pro náhradu sklovinné vrstvy či zatékavé kompozity typu *flow*).

Skladování:

Produkty Dentapreg® skladujte při teplotách v rozmezí 4 – 25 °C v neporušeném obalu mimo působení přímých světelných zdrojů. Nevystavujte dlouhodobě teplotám vyšším, než 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu. Po otevření blistry je možno nespotebovanou část pásku uchovat v ochranném obalu (*light protection box*), který je součástí balení. V tomto balení dále uchovávejte produkt v lednici při teplotách v rozmezí 4 – 10 °C a použijte během následujících čtyř týdnů.


Doplňující informace:

Produkt je určen výlučně k použití zubním lékařem (na přípravě nepřímo zhotovených náhrad se může podílet zubní technik). Používejte vždy v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu k použití a v souladu s definovanými určenými účely použití. ADM, a.s. nepřijímá odpovědnost za škody vzniklé kvůli nedodržení předepsaného postupu aplikace či použití mimo stanovený indikační rozsah. Vždy se seznámte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese www.dentapreg.com. Můžete je také získat od svého dodavatele.

1) Napreparujte zub na korunku.



8) Vyměte pásek Dentapreg® UFM z blistry a ustrihněte ho pomocí nůžek na požadovanou délku. Nedotýkejte se nechráněné části pásku holou rukou. Vždy používejte latexové nebo vinylové nepudrované rukavice. Nespotřebovanou část pásku uchovávejte v ochranném obalu (light protection box), který je součástí balení. Uchovávejte ji na tmavém místě po dobu následujících 4 týdnů.

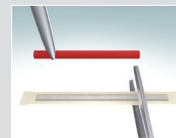

15) Vytvrďte celou korunku v souladu s doporučením výrobce.



2) Zajistěte suché pracovní pole, doporučujeme použít kofrdam.



9) Naneste tenkou vrstvu (cca 0,5 mm) kompozitního výplňového materiálu na retenční plochu zubu. **NEVYTVRZUJTE!**



16) Dokončete korunku, upravte povrch okluze a vyleštěte ji.




3) Změřte požadovanou délku pásku Dentapreg® UFM. Na měření použijte voskový drát, vlákno wedjets, zubní nit apod.



10) Z pásku odstraňte ochrannou folii a papír a pásek umístěte do požadované pozice v nevytvrzeném kompozitu. Pro jednodušší adaptaci a manipulaci s páskem použijte nástroj Dentapreg® Fork.



17) Hotová korunka.

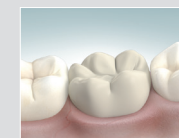

4) Naleptejte retenční plochu zubu leptacím gelem s 37% kyselinou ortofosforečnou. Při nanášení dbejte pokynů výrobce.



11) Pásek vytvrzujte po dobu minimálně 40 s pro každý zub.



Důležité:

- Pásek Dentapreg® musí být vždy zcela pokryt kompozitním materiálem.
- Optimální tloušťka vrstvy kompozitního materiálu mezi páskem Dentapreg® a vnějšími povrchy je 2 mm.
- Pro adaptaci pásků Dentapreg® používejte kovové nástroje, jako jsou např. pinzeta nebo špachtle. Nástroje před použitím sterilizujte.
- Nepoužívejte v případech, kdy není možno zajistit suché pracovní pole.
- Dbejte na to, abyste v dokončovací fázi neporušili vyztužující vlákna

5) Důkladně opláchněte a osušte.



12) Vytvrzený pásek překryjte vrstvou kompozitního výplňového materiálu.



6) Naneste na naleptanou retenční plochu zubu tenkou vrstvu adhezivního systému.



13) Vytvrďte kompozit podle pokynů výrobce.



7) Vytvrďte adhezivum podle pokynů výrobce.



14) Vybudujte korunku vrstvením kompozitního výplňového materiálu v souladu s doporučením výrobce kompozitu. Mezizubní prostory nechte volné pro umožnění hygieny.

